

HM SPLINT

Ортопедична шина от хибридна мрежа



New Cast Industry CO., Ltd,

11, Cheoyongsaneop 5-gil, Cheongnyang-myeon, Ulju-gun, Ulsan, Korea



Sanusmed Distribution Ltd,

Doamna Oltea str., no.33, 1st floor, Office no. 10, 2nd District, 020231, Bucharest, Romania
Phone.: +40 721261363 /Fax: +40 212311031/E-Mail: office@hmcast.eu /web:

www.hmcast.eu

Официален дистрибутор за България: МорбусМед ООД,

Телефон: +359 877 313267/ e-mail: hmcastbg@gmail.com/ web: www.hmcast.eu

Описание:

HM Splint е синтетична система за шиниране, изработена от полиестерна тъкан, импрегнирана с полиуретанова смола и покрита с поларна материя от двете страни. Контактът на продукта HM Splint с вода иницира химическа реакция, която причинява втвърдяване на продукта.

Благодарение на своята гъвкавост, той лесно постига елипсоидна форма за зоните на ставните участъци на крайниците, като лакът, глезен или коляно, предотвратявайки наранявания от притискане и/или триене.

Рентгеновите лъчи лесно проникват и помагат да се провери в детайли процеса на костно срастване. Също така, готовият продукт HM Splint е водоотблъскващ и може лесно да се изсуши след душ с добра вентилация и телесна топлина.

Състав:

Материалите HM Splint са съставени от полиестерна тъкан, импрегнирана с водо-активирана полиуретанова смола и покрита с поларна материя от двете страни.

Показания за употреба:

Продуктите HM Splint са предназначени за използване при изготвянето на най-често срещаните ортопедични имобилизации за крайниците на тялото.

Предназначението на ригидната външна имобилизация включва:

- Имобилизация при фрактури на костите
- Лечение на мекотъканни и ставни увреди
- Имобилизация в рамките на лечение за корекция или превенция на анатомични деформации.

Специфичната пригодност и приложение на продукта е отговорност на квалифициран медицински специалист на място.

Спецификации:

Съдържание на опаковката: 1 HM Splint шина

HM Splint се предлага в различни размери за използване върху крайниците на тялото.

Продукт	Описание/Размер/Вид/Употреба		
HMS330	HM имобилизационна шина 3 инча (7,62 cm x 30 cm)	Предварително изрязана	Универсална употреба (дете / възрастен)
HMS388	HM имобилизационна шина 3 инча (7,62 cm x 88 cm)		
HMS438	HM имобилизационна шина 4 инча (10,16 cm x 38 cm)		
HMS476	HM имобилизационна шина 4 инча (10,16 cm x 76 cm)		
HMS576	HM имобилизационна шина 5 инча (12,7 cm x 76 cm)		
HMS5114	HM имобилизационна шина 5 инча (12,7 cm x 114 cm)		
HMS3450	HM имобилизационна шина 3 инча (7,62 cm x 450 cm)	Тип ролка	
HMS4450	HM имобилизационна шина 4 инча (10,16 cm x 450 cm)		
HMS5450	HM имобилизационна шина 5 инча (12,7 cm x 450 cm)		

HM SPLINT Процедура за поставяне:

■ Шиниране на предмишница

Ако използвате тип ролка, отворете кутията, извадете пластмасовото уплътнение, след което изберете и изрежете желаната дължина шина. Поставете обратно пластмасовото уплътнение, за да запазите останалата част от продукта.

Ако използвате предварително изрязан тип, изберете най-подходящия размер за пациента. Извадете шината от торбичката.

1. Потопете шината във вода (20°C до 25°C) за 7 секунди.
2. Внимателно отстранете излишната вода с помощта на кърпа, след което поставете HM шината на частта от тялото, която ще се третира.
3. Фиксирайте с помощта на превръзка.
4. Поставете пациента в желаната позиция и го задръжте неподвижно за 10 минути.

Посетете www.hmcast.eu за повече информация относно процедурата:

<https://hmcast.eu/gallery-video/>

Ръководствата подлежат на промяна; Най-актуалната версия на всяко ръководство е винаги налична онлайн.



ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ЗАБЕЛЕЖКИ:

Избягвайте счупване, прегъване или перфориране на опаковката преди употреба.

Не стискайте и не изстисквайте. Не използвайте, ако опаковката е повредена.

Не прилагайте, при наличие на алергии, анафилаксия, кървене, възпаление, обрив или инфекция.

Избягвайте контакт с кожата:

Когато използвате HM Splint, е необходимо да носите защитни ръкавици. Трябва да се избягва контакт на кожата с непокрит полимер.

Ако смолата влезе в контакт с кожата, тя може да бъде отстранена с алкохол или ацетон.

Изисквания за срок на годност и съхранение:

Съхранявайте хоризонтално. Съхранявайте продукта на хладно и сухо място, далеч от слънчева светлина.

Ако продуктът се съхранява в изправено положение, втвърдящата течност вътре в продукта се стича и здравината на продукта е неравномерна, което го прави неизползваем.

Съхранявайте при температури между 15°C и 30°C (в идеалния случай 22°C до 25°C.) За срок на годност, вижте срока на годност обозначен на опаковката. Всяка кутия и торбичка са маркирани с партиди и срок на годност.

Уверете се, че има добра вентилация: Полиестерната прежда с покритие с полиуретанова смола съдържа ниско летлива форма на изоцианати. Обикновено се препоръчва обработката на HM Splint във вентилирани помещения.

Обърнете внимание на температурата на водата (21°C -24°C): При работа с HM Splint трябва да се използва чиста вода с температура 21-24°C.

В зависимост от продукта се наблюдава осезаемо затопляне по време на периода на втвърдяване (екзотермична реакция). Това отшумява в рамките на няколко минути.

Ако се използва по-топла вода (> 24°C), екзотермичната реакция е по-силна; това може да доведе до развитие на по-висока температура и нежелани странични ефекти.

Когато обработвате HM Splint, обикновено се препоръчва да се поддържа температурата на водата, посочена в тези инструкции.

Обяснение на символите на етикета:

 Производител	 Пази от светлина
 Дата на производство	 Температурни граници при съхранение
 Срок на годност	 Не използвай повторно
 Номер на партида	 Консултирай се с инструкциите за употреба
 Код в каталог	 Внимание
 Не използвай, ако пакетът е повреден	 Пази от влага
 Количество в пакет	 Вносител
 Уникален идентификатор на изделие	 Медицинско изделие
 Оторизиран европейски представител в Европейския Съюз	